


腹腔鏡下手術用腸管結紮器

GUT CLAMPER

ガットクランパー

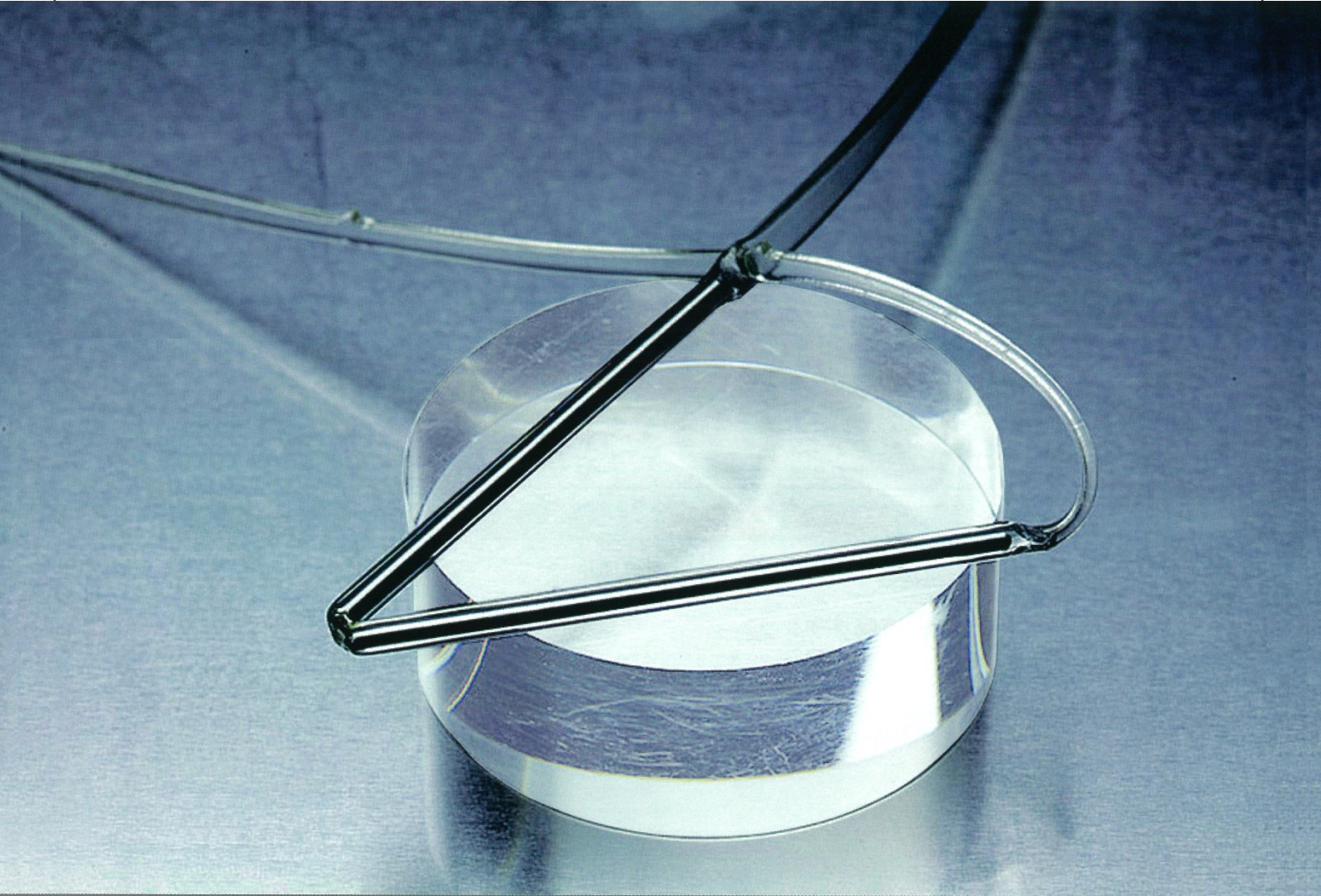

Laparoscopic Low Anterior Resection of Rectum Using New Device

KOBE BIOMEDIX

腹腔鏡下直腸低位前方切除術（LLAR）での 確実な腸管把持、閉鎖に・・・


狭い骨盤腔への挿入が容易で、視野を妨げることもなく、他の器具挿入も容易に行えます。また腸管軸に直交方向にクランプができ、厚みのある腸管へのクランプも可能です。

■腹腔鏡下直腸低位前方切除術（LLAR）

- 直腸洗浄時の直腸閉鎖で・・・
全周での完全閉鎖が可能で、閉鎖の移動がなく、噛み直しが容易にできます。
- 肛側切離時の安定した縫合器操作で・・・
縫合不全が減少でき、替え刃の節約に繋がります。
- 巨大 Ra 腫瘍の口側操作時の腸把持に・・・
腹腔内播種の危険防止。


※《使用時のポイント》

直腸間膜処理前や肥厚した直腸をクランプする時には、孔（大／ ϕ 2 mm）と孔（小／ ϕ 1 mm）間を切開し、つなぎ合わせることで孔への鋼線 B の挿入が容易に行えます。

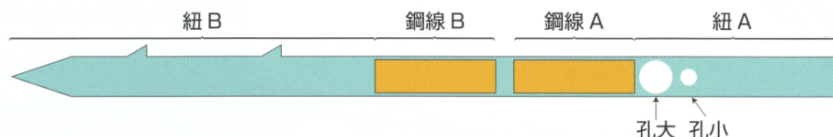

品 番	有効長（鋼線）	全 長
GCM01	A50 mm／B55 mm	407 mm

『GUT CLAMPER による直腸クランプ』

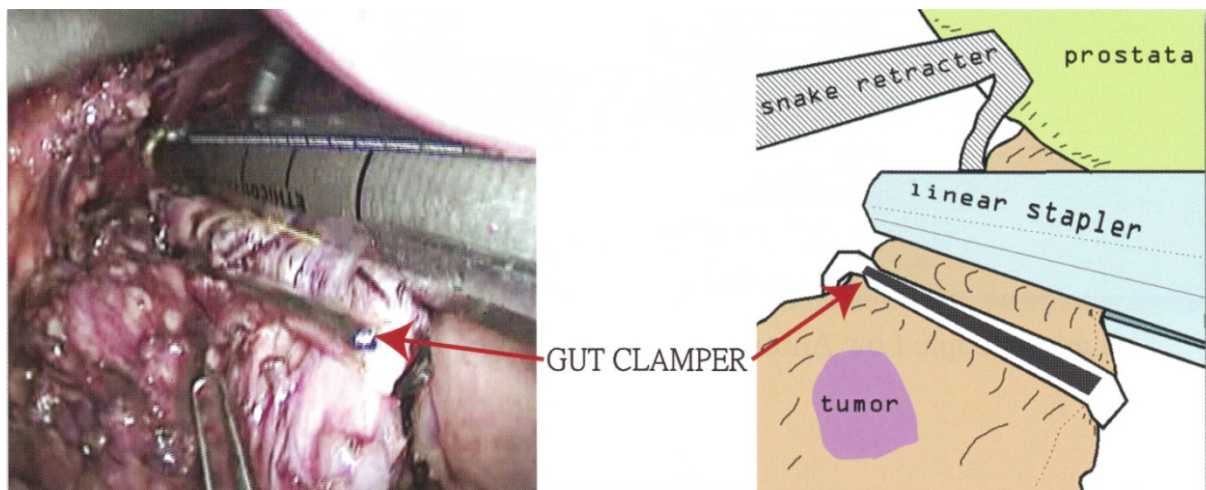

販売元



神戸バイオメディクス株式会社

〒653-0866 兵庫県神戸市長田区長者町 17-3

TEL : 078-647-8347 FAX : 078-647-8947

URL : <https://kobe-biomedix.co.jp>