

脱気式 患者体位固定具 『PF パッド』 ご使用方法


ご使用については、下記をお読みいただけますようお願い申し上げます。

1. 固定方法

- ① 本体が柔らかい状態で固定したい部位に装着してください（装着図参照）。



- ② 付属のポンプチューブ先端にある Spin Lock Barb を本体側の脱気チューブにある 1Way Stop Cock に差し込み、Spin Lock Barb を右に回転させて接続してください。

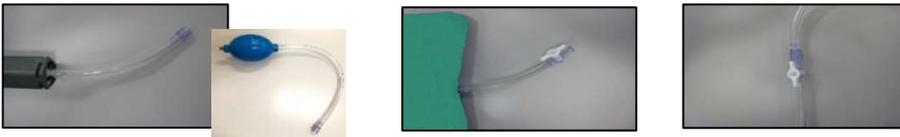

- ③ ポンプ本体先端側を片手で持ち、手前側を抜き差しすることで脱気します。
丸型ポンプは、カフ（青色）を揉むと脱気します。



- ④ 固定状態を確認しながら脱気を行ってください。
- ⑤ 適度と思われたら脱気作業を中止し、ポンプを外してください。
Spin Lock Barb を左に回転させると外せます。

2. 汚れたら

本体は防水構造ですが、洗浄は手洗いでお願いいたします。

この際、1Way Stop Cock は“閉”の状態にしてください。万一内部に水等が混入しますと乾燥が困難となる上、動作不良等の原因にもなりますのでご注意ください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。

血液、消毒剤等は、なるべく早めに洗浄ください。

乾燥は、自然乾燥してください。

3. その他

本体内部には仕切等はございません。

中材を（発泡ビーズ）片方に寄せたいような場合は、空気が入っている自然な状態で本体を振るようになると中材はその方向にある程度移動させることが可能です。

その場合でも脱気固定は可能です。

【注意】

脱気力の大きな機械装置などによる吸引は、本体内部の部品等を破損させてしまう恐れがありますのでご使用はお控えください。