


患者体位固定具 KBM イーコレ使用方法


- ① 本体の脱気口（白色）にポンプを接続し、ポンプのジョイント部分を回して外してください。

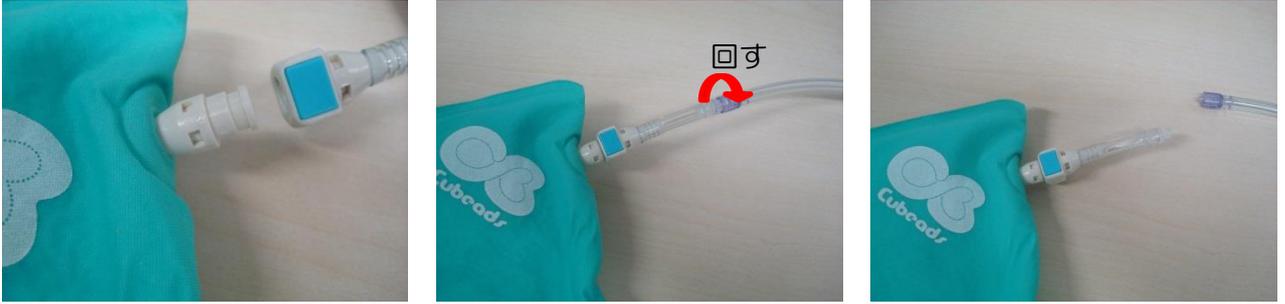


- ② イーコレ本体を揉むと空気が入り柔らかい状態になります。固定したい部位に装着してください。



- ③ ポンプのジョイント部分を繋ぎ、ポンプを抜き差しすると脱気されます。固定状態を確認しながら、ポンプを抜き差ししてください。

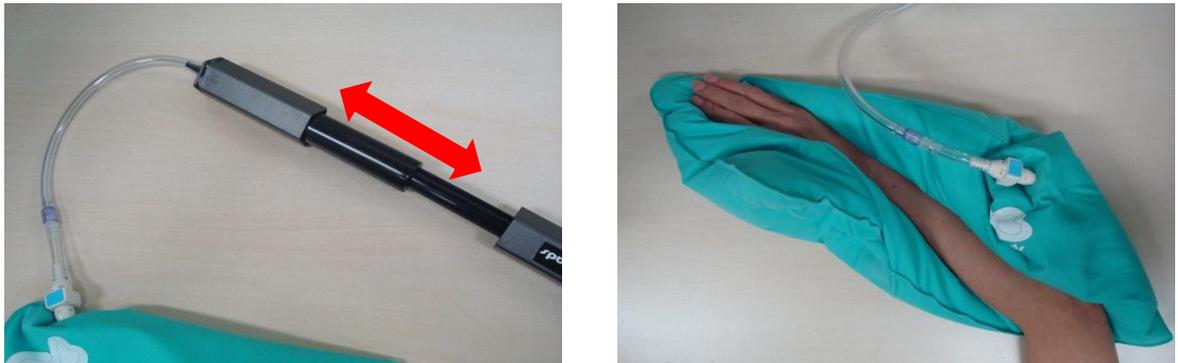

- ④ 脱気、固定が終わりましたら、ポンプの青い部分を指でつまみ脱気口から外してください。

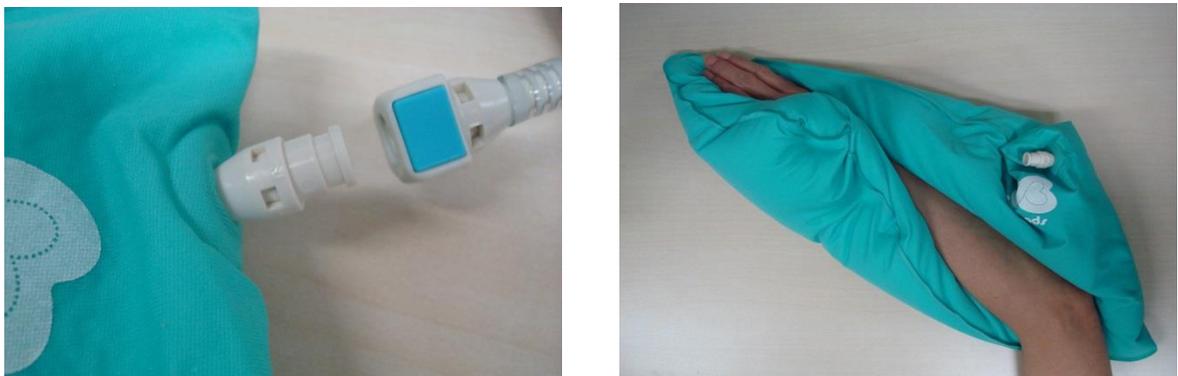

汚れたら、手洗いです（お手入れ方法をご参照ください）。

予め、汚れの付着することがお分かりの場合は、不織布（ラミネート加工品）等をご使用ください。